

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PEMELIHARAAN SUCTION PUMP		
	No Dokumen : 020/INTENSIVE/SPO/RSPGP/X/2025	No. Revisi : 00	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 02 Oktober 2025	Ditetapkan : Direktur Utama Rumah Sakit  <u>dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes</u>	
PENGERTIAN	Pemeliharaan suction pump adalah menjaga alat tetap higienis dan berfungsi optimal agar selalu siap pakai.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pemeliharaan Suction Pump		
KEBIJAKAN	Surat keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Permata Gunung Putri nomor 081/SK-DIR/RSPGP/III/2025 tentang Pedoman Pelayanan Ruang Intensive.		
PROSEDUR	Langkah-langkah berikut perlu dilakukan setiap kali selesai menggunakan suction pump adalah sebagai berikut 1. Petugas Mematikan dan mencabut kabel: memastikan alat dalam kondisi mati dan tidak terhubung dengan listrik untuk mencegah korsleting. 2. Petugas mengosongkan dan membersihkan wadah penampung. membuang cairan atau zat yang telah disedot dari tabung atau wadah penampung. 3. Petugas mencuci wadah dengan air mengalir dan larutan disinfektan. 4. Petugas membilas hingga bersih dan mengeringkan dengan lap atau tisu sekali pakai. 5. Petugas membersihkan selang dan kateter: membilas selang dan kateter dengan air bersih yang mengalir. 6. Petugas merendam dalam larutan disinfektan sesuai anjuran produsen. 7. Petugas mengeringkan secara menyeluruh sebelum disimpan. 8. Petugas membersihkan bagian luar alat: mengelap bagian body suction pump dengan kain bersih yang dibasahi larutan disinfektan untuk menghilangkan kotoran atau cairan yang menempel.		

PEMELIHARAAN SUCTION PUMP

No Dokumen :
020/INTENSIVE/SPO/RSPGP/X/2025

No. Revisi :
00

Halaman :
2/3

9. Petugas merapikan dan menyimpan alat: Setelah bersih dan kering, gulung kabel dengan rapi dan tutup alat dengan penutup kain. Simpan di tempat yang kering dan bersuhu ruangan.

Catatan dan dokumentasi

1. Petugas menyimpan catatan pemeliharaan yang mencakup tanggal pemeliharaan, jenis tindakan yang dilakukan, dan nama petugas.
2. Petugas mencatat hasil pengujian daya hisap selama kalibrasi atau pemeriksaan rutin. Hal ini membantu melacak kinerja alat dari waktu ke waktu.
3. Petugas melaporkan kerusakan Jika ada masalah atau kerusakan, catat dalam laporan dan segera laporkan kepada pihak berwenang untuk diperbaiki.

UNIT TERKAIT

UGD
Rawat Inap
OK
Poliklinik

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PEMELIHARAAN SUCTION PUMP		
	No Dokumen : 020/INTENSIVE/SPO/RSPGP/X/2025	No. Revisi : 00	Halaman : 3/3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Yusuf Ifandi, A.Md.Kep	Perawat		02-10-2025
Menyetujui 1	M1	Ns. Amami, S.Kep., M.Kep	Manager Keperawatan		02-10-2025
Menyetujui 2	M2	Ns. Erni Irawati Harahap, S.Kep	Komite Keperawatan		02-10-2025
Verifikator 1	V1	Ns.Irma Fatimah, S.Kep.	SPI		02-10-2025