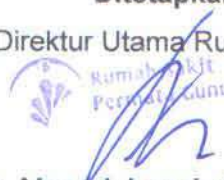


 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Best & Compassion</i>	PENGOPERASIAN LAMPU OPERASI		
	No. Dokumen 089/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 05 Maret 2025	Ditetapkan : Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	Lampu operasi adalah suatu alat yang digunakan untuk penerangan saat sedang melakukan tindakan operasi pada pasien		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan pengoperasian lampu operasi di Kamar Bedah Rumah Sakit Permata Gunung Putri.		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RS Permata Gunung Putri nomor 075/SK-DIR/RSPGP/III/2025 tentang Pedoman Pelayanan Ruang Kamar Bedah		
PROSEDUR	1. Hidupkan alat dengan menggunakan tombol power ON pada lampu atau control panel 2. Pastikan lampu indicator akan menyala bila alat dalam keadaan hidup atau beroperasi 3. Lakukan settingan pada tombol lampu operasi atau control panel sesuai dengan yang dikehendaki 4. Pastikan lampu operasi dalam keadaan normal 5. Untuk mematikan lampu tekan power OFF 6. Perawatan dan pemeliharaan dilakukan oleh Teknik terkait		
UNIT TERKAIT	Unit Kamar Bedah		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Best & Compassionate</i>	PENGOPERASIAN LAMPU OPERASI		
	No. Dokumen 089/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	Revisi 00	Halaman 2/2

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dydi Suwandi,AMK	Ka. Unit Bedah		5/3 ²⁵
Menyetujui 1	M1	dr. Hanindyo Riezky Beksono, SpB.M.Ked.Klin	Ka.SMF Bedah		5/3 ²⁵
Menyetujui 2	M2	dr. Wediat Setiawan	Manager Pelayanan Medis		5/3 ²⁵
Menyetujui 3	M3	Ns. Amami, S.Kep, M.Kep	Manager Keperawatan		5/3 ²⁵
Verifikator 1	V1	Irma Fatimah S.kep Ners	SPI		5/3 ²⁵