

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	STERILISASI ALAT/INSTRUMEN/ LINEN		
	No. Dokumen	No. Revisi :	Halaman
	107/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	00	1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 05 Maret 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	1. Sterilisasi adalah Suatu upaya untuk menghilangkan mikroorganisme pada Instrumen (alat-alat kesehatan) termasuk spora 2. Autoclave adalah suatu alat atau mesin sterilisasi yang berupa steam bertekanan tinggi dengan suhu tertentu . 3. Autoclave tape adalah bahan yang terbuat bahan kusus yang dapat dijadikan salah satu indikator proses sterilisasi bekerja dengan baik sehingga menghasilkan alat yang steril		
TUJUAN	Sebagai acuan untuk : 1. Menghilangkan mikroorganisme dan spora 2. Instrumen yang digunakan aman untuk dipaka		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RS Permata Gunung Putri nomor 075/SK-DIR/RSPGP/III/2025 tentang Pedoman Pelayanan Ruang Kamar Bedah		
PROSEDUR	1. Petugas Sterilisasi (CSSD) membungkus alat/instrumen/linen yang akan disterilkan dengan pouches , kertas khusus atau kain. 2. Bila menggunakan kertas khusus atau kain , Bungkus alat/instrumen/linen dengan kain sebanyak dua lapis atau dengan bahan pembungkus khusus dan ikat. Tempelkan autoclave tape pada kain/kertas pembungkus . 3. Petugas Sterilisasi (CSSD) mencatat alat/instrumen/linen yang akan disterilkan pada buku sterilisasi dan memberi label Nama Set ,tanggal pensterilan, ruangan, operator, tanggal kadaluarsa. 4. Petugas Sterilisasi (CSSD) memanaskan mesin autoclave.		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	STERILISASI ALAT/INSTRUMEN/ LINEN		
	No. Dokumen	No. Revisi :	Halaman
	107/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	00	2/3
	5. Masukkan instrumen yang akan disterilkan ke dalam Chamber autoclave maksimal 75 % dari kapasitas chamber mesin. 6. Tutup pintu autoclave dengan benar. 7. Nyalakan Power autoclave Pilih menu steril bahan instrumen dengan Waktu pemanasan mesin autoclave selama 45 menit dan Sterilisasi instrumen atau bahan logam pada suhu 135 -137 °C dengan tekanan 2.1 ATM selama 7 menit atau sesuai program yang dibutuhkan. 8. Buka pintu chamber Autoclave bila tekanan sudah menunjukkan angka 0 (nol) 9. Keluarkan Instrumen dan simpan diruang penyimpanan alat steril.		
UNIT TERKAIT	a. Instalasi Rawat Inap b. Instalasi Gawat Darurat c. Instalasi ICU / NICU d. Instalasi Ruang Bersalin e. Instalasi Kamar Bedah		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	STERILISASI ALAT/INSTRUMEN/ LINEN		
	No. Dokumen	No. Revisi :	Halaman
	107/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	00	3/3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dydi Suwandi,AMK	Ka. Unit Bedah		05/03/2025
Menyetujui 1	M1	dr. Hanindyo Riezky Beksono, SpB.M.Ked.Klin	Ka.SMF Bedah		05/03/2025
Menyetujui 2	M2	dr. Wediat Setiawan	Manager Pelayanan Medis		05/03/2025
Menyetujui 3	M3	Ns. Amami, S.Kep, M.Kep	Manager Keperawatan		05/03/2025
Verifikator 1	V1	Irma Fatimah S.kep Ners	SPI		05/03/2025