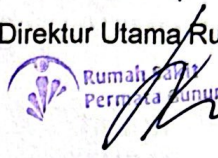
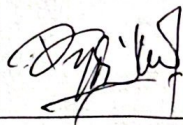


 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	CARA MENGGUNAKAN CHEMICAL INDIKATOR (INDIKATOR TAPE/ INDIKATOR EKSTERNAL)		
	No. Dokumen 112/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 05 Maret 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	Suatu alat berbentuk strip atau tape yang menandai terjadinya pemaparan sterilan pada obyek yang akan disterilkan ditandai dengan adanya perubahan warna.		
TUJUAN	Sebagai acuan untuk Untuk menandai bahwa kondisi instrument melalui proses sterilisasi.		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RS Permata Gunung Putri nomor 075/SK-DIR/RSPGP/III/2025 tentang Pedoman Pelayanan Ruang Kamar Bedah		
PROSEDUR	1. Siapkan set instrument yang telah diset dan dikemas dengan linen atau wipak plastik. 2. Ambil rool indikator tape dan potong dengan gunting sesuai ukuran. 3. Tempelkan indikator tape tersebut di bungkus instrument yang akan disteril. 4. Instrument yang telah direkatkan dengan indikator masukan di dalam mesin steril. 5. Setelah proses selesai pada indikator tape yang mula – mula berwarna garis putih-putih berubah menjadi warna bergaris hitam menunjukan bahwa kondisi untuk proses sterilisasi telah terpenuhi.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Jalan b. OK, VK, ICU, UGD		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	CARA MENGGUNAKAN CHEMICAL INDIKATOR (INDIKATOR TAPE/ INDIKATOR EKSTERNAL)		
	No. Dokumen 112/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025	No. Revisi : 00	Halaman 2/2

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dydi Suwandi,AMK	Ka. Unit Bedah		05/03-2025
Menyetujui 1	M1	dr. Hanindyo Riezky Beksono, SpB.M.Ked.Klin	Ka.SMF Bedah		05/03-2025
Menyetujui 2	M2	dr. Wediat Setiawan	Manager Pelayanan Medis		05/03-2025
Menyetujui 3	M3	Ns. Amami, S.Kep, M.Kep	Manager Keperawatan		05/03-2025
Verifikator 1	V1	Irma Fatimah S.kep Ners	SPI		05/03-2025