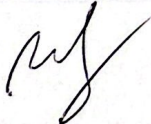


|  <b>Rumah Sakit<br/>Permata Gunung Putri</b><br><i>Trust &amp; Compassion</i> | PENYIMPANAN INSTRUMENT STERIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                | No. Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. Revisi :                                                                                                                                                                                       | Halaman |
|                                                                                                                                                                | 109/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00                                                                                                                                                                                                 | 1/2     |
| <b>STANDAR PROSEDUR<br/>OPERASIONAL<br/>(SPO)</b>                                                                                                              | Tanggal terbit :<br><br>05 Maret 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ditetapkan<br>Direktur Utama Rumah Sakit<br><br>Rumah Sakit Permata Gunung Putri<br>dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes |         |
| <b>PENGERTIAN</b>                                                                                                                                              | Penyimpanan instrument steril adalah Tata cara yang benar tentang penyimpanan instrument steril di ruang CSSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>TUJUAN</b>                                                                                                                                                  | Sebagai acuan untuk Menjamin mutu sterilitas alat-alat yang disterilkan dan memudahkan pendistribusian instrument ke unit terkait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>KEBIJAKAN</b>                                                                                                                                               | Peraturan Direktur RS Permata Gunung Putri nomor 075/SK-DIR/RSPGP/III/2025 tentang Pedoman Pelayanan Ruang Kamar Bedah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>PROSEDUR</b>                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Siapkan Ruangan bersih dan bebas dari polusi jauh dari tempat ramai dan tempat cuci.</li><li>2. Pertahankan Suhu ruangan antara 23°C dan - 26°C.</li><li>3. Tempelkan Label/nama etiket barang pada tempat yang mudah kelihatan.</li><li>4. Gunakan tempat/wadah yang bersih saat membawa alat steril</li><li>5. Susun intrumen steril pada rak yang bersih</li><li>6. Simpan alat steril yang baru secara terpisah dengan yang lama</li><li>7. Tulis tanggal kadaluarsa atau waktu steril ulang</li><li>8. Catat pada buku registrasi CSSD</li><li>9. Lakukan pengecekan setiap hari</li></ol> |                                                                                                                                                                                                    |         |
| <b>UNIT TERKAIT</b>                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Instalasi Rawat Inap</li><li>b. Instalasi Gawat Darurat</li><li>c. Instalasi ICU / NICU</li><li>d. Instalasi Ruang Bersalin</li><li>e. Instalasi Kamar Bedah</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |         |

|  <b>Rumah Sakit<br/>Permata Gunung Putri</b><br><i>Trust &amp; Compassion</i> | PENYIMPANAN INSTRUMENT STERIL |              |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                                                | No. Dokumen                   | No. Revisi : | Halaman |
|                                                                                                                                                                | 109/SPO/YANMED/RSPGP/III/2025 | 00           | 2/2     |

LEMBAR VERIFIKASI

| PIC           |    | NAMA                                           | JABATAN                 | TANDA TANGAN                                                                          | TANGGAL         |
|---------------|----|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Penyusun 1    | P1 | Dydi Suwandi,AMK                               | Ka. Unit Bedah          |    | 05/- 2025<br>03 |
| Menyetujui 1  | M1 | dr. Hanindyo Riezky Beksono,<br>SpB.M.Ked.Klin | Ka.SMF Bedah            |    | 05/- 2025<br>03 |
| Menyetujui 2  | M2 | dr. Wediat Setiawan                            | Manager Pelayanan Medis |   | 05/- 2025<br>03 |
| Menyetujui 3  | M3 | Ns. Amami, S.Kep,<br>M.Kep                     | Manager Keperawatan     |  | 05/- 2025<br>03 |
| Verifikator 1 | V1 | Irma Fatimah S.kep<br>Ners                     | SPI                     |  | 05/- 2025<br>03 |