

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PENCETAKAN FILM		
	No. Dokumen 036/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1 Dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 10/04/2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	

PENGERTIAN	Pencetakan film adalah suatu proses pengolahan hasil foto menjadi gambar yang dapat dibaca oleh ahlinya dokter konsulen.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah pencetakan Film
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 027/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Permata Gunung Putri.
PROSEDUR	1. Petugas radiasi memasang film di printer Epson L1256 dan melakukan pengecekan terhadap koneksi printer ke PC komputer workstation x-ray DR dan cek ketersediaan dalam printer. 2. Petugas radiologi mengedit foto yang sudah selesai dilakukan sesuai dengan permintaan pemeriksaan, atur kontras dan densitas foto dengan baik dan dapat dinilai oleh dokter spesialis radiologi. 3. Petugas radiologi mengatur frame atau ukuran film (portrait atau landscape) sesuai kebutuhan 4. Petugas radiologi memeriksa kembali data identitas pasien, marker kemudian pilih menu cetak pada tool editing film. 5. Petugas radiologi memilih tool cetak film, klik sesuai 6. Petugas radiologi menunggu beberapa saat hingga proses cetak film selesai.
UNIT TERKAIT	1. Unit Rawat Inap 2. Unit Rawat jalan 3. Instalasi Gawat Darurat

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Kind & Compassion</i>	PENCETAKAN FILM		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 036/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi 00	2 Dari 2

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dwi Nurhayati, A.Md.Rad	SPV Radiologi		10 April 2025
Menyetujui 1	M1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Kepala Bagian Penunjang Medis		10 April 2025
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	Satuan Pengawas Internal		10 April 2025