

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PERAWATAN PESAWAT X-RAY CANON DR1824		
	No. Dokumen 037/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1 Dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 10/04/2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	

PENGERTIAN	Perawatan pesawat X-Ray Canon adalah tindakan – tindakan yang dilakukan untuk memelihara pesawat dengan baik dan benar sehingga selalu dalam keadaan siap pakai, bersih dan tahan lama.
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah dalam Pengoperasian Alat X- Ray Konvensional Canon DR 1824
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 027/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Permata Gunung Putri.
PROSEDUR	A. Petugas radiologi mempersiapkan peralatan pesawat X-Ray canon, panel kontrol, system control unit. B. Petugas radiologi melakukan perawatan pesawat X-Ray Canon di ruang pemeriksaan sebagai berikut : 1) Petugas radiologi melakukan perawatan umum pesawat dengan menjaga kondisi dan kebersihan pesawat dengan mengontrol terlebih dahulu sebelum pesawat digunakan dan setiap shift dinas , pesawat dioperasikan oleh radiografer sesuai dengan prosedur pengoperasian pesawat dan setiap selesai digunakan untuk melakukan pemeriksaan, pesawat dipastikan dalam keadaan bersih dan rapi kembali 2) Petugas radiologi segera membersihkan alat apabila terdapat bercak darah atau kotor karena pasien, agar tidak meninggalkan bekas noda. C. Perawatan khusus pesawat dilakukan oleh Teknisi atau pihak ketiga yang sudah ditentukan dari rumah sakit, antara lain :



PERAWATAN PESAWAT X-RAY CANON DR1824

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

No. Dokumen

037/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025

No. Revisi

00

2 Dari 3

PROSEDUR

- 1) Pihak ke-3 melakukan kalibrasi alat dilakukan minimal satu kali dalam setahun, berkoordinasi dengan unit teknik medik sesuai dengan penjadwalan kalibrasi yang dilakukan oleh pihak ke-tiga yang sudah ditunjuk dari rumah sakit.
- 2) Pihak ke-3 melakukan uji kesesuaian dilakukan minimal 4 tahun sekali apabila tidak ada indikasi atau perubahan ruangan, perpindahan alat, adanya pembelian alat baru. Uji kesesuaian dilakukan oleh pihak ke-tiga yang sudah ditunjuk dari rumah sakit dengan koordinasi unit teknik medik.
- 3) Petugas radiologi melaporkan kepada SPV dan teknisi apabila di dalam pengoperasian pesawat dijumpai adanya trouble dan kerusakan (error).
- 4) Teknisi rumah sakit / teknik medik memberikan laporan kepada manager teknik IPSRS dan apabila terjadi kerusakan alat masih dalam masa garansi, teknisi dari pihak ke-tiga akan memperbaiki hingga alat bisa digunakan Kembali.

UNIT TERKAIT

1. IT
2. IPSRS
3. GA

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PERAWATAN PESAWAT X-RAY CANON DR1824		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 037/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi 00	3 Dari 3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dwi Nurhayati, A.Md.Rad	SPV Radiologi		10 April 2025
Menyetujui 1	M1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Kepala Bagian Penunjang Medis		10 April 2025
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	Satuan Pengawas Internal		10 April 2025