

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PERAWATAN PESAWAT CT SCAN CANON 32 SLICE		
	No. Dokumen 039/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1 Dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 10/04/2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	

PENGERTIAN	Perawatan pesawat Canon CT Scan Canon 32 Slice adalah tindakan tindakan yang dilakukan untuk memelihara pesawat dengan baik dan benar sehingga selalu dalam keadaan siap pakai, bersih dan tahan lama.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah Perawatan pesawat Canon CT Scan Canon 32 Slice
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 027/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Permata Gunung Putri.
PROSEDUR	A. Petugas radiologi menyiapkan pesawat CT Scan Canon 32 Slice dan meja console. B. Petugas radiologi melakukan perawatan alat di ruang pemeriksaan Ct scan dengan perawatan umum pesawat sebagai berikut : 1) Petugas radiologi menjaga kondisi dan kebersihan pesawat, mengontrol terlebih dahulu sebelum pesawat digunakan dan setiap shift dinas , 2) Pesawat dioperasikan oleh radiografer sesuai dengan prosedur pengoperasian pesawat dan radiografer sebelum menggunakan pesawat CT Scan melakukan warming up dan sebelum melakukan pemeriksaan cek panas tabung/OLP tube, apabila panas tabung di bawah 10% lakukan warming up terlebih dahulu. 3) Petugas radiologi mematikan pesawat CT Scan apabila tidak ada pasien dalam jangka waktu yang cukup lama, dan mematikan pesawat dengan memperhatikan panas tabung atau OLP/tube di bawah 10%.

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Best &amp; Comprehensive</i>	PERAWATAN PESAWAT CT SCAN CANON 32 SLICE		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 039/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi 00	2 Dari 3

PROSEDUR	4) Petugas radiologi melakukan pengecekan kerapihan dan kebersihan alat setelah selesai melakukan pemeriksaan, apabila selesai melakukan pemeriksaan terdapat bercak darah atau kotor karena pasien, segera dibersihkan agar tidak meninggalkan bekas noda C. Perawatan khusus pesawat dilakukan oleh Teknisi atau pihak ketiga yang sudah ditentukan dari rumah sakit, antara lain : 1) Pihak Ke-3 melakukan kalibrasi alat dilakukan minimal satu kali dalam setahun, berkoordinasi dengan unit teknik medik sesuai dengan penjadwalan kalibrasi yang dilakukan oleh pihak ke-tiga yang sudah ditunjuk dari rumah sakit. 2) Pihak ke-3 melakukan uji kesesuaian dilakukan minimal 4 tahun sekali apabila tidak ada indikasi atau perubahan ruangan, perpindahan alat, adanya pembelian alat baru. Uji kesesuaian dilakukan oleh pihak ke-tiga yang sudah ditunjuk dari rumah sakit dengan koordinasi unit teknik medik. 3) Petugas radiologi melaporkan kepada SPV dan teknisi apabila di dalam pengoperasian pesawat dijumpai adanya trouble dan kerusakan (error). 4) Teknisi rumah sakit / teknik medik memberikan laporan kepada manager teknik IPSRS dan apabila terjadi kerusakan alat masih dalam masa garansi, teknisi dari pihak ke-tiga akan memperbaiki hingga alat bisa digunakan kembali.
UNIT TERKAIT	1. IT 2. IPSRS 3. GA

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PERAWATAN PESAWAT CT SCAN CANON 32 SLICE		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 039/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi 00	3 Dari 3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dwi Nurhayati, A.Md.Rad	SPV Radiologi		10 April 2025
Menyetujui 1	M1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Kepala Bagian Penunjang Medis		10 April 2025
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	Satuan Pengawas Internal		10 April 2025