

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PERAWATAN PESAWAT ULTRASONOGRAFI		
	No. Dokumen 041/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1 Dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 10/04/2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	

PENGERTIAN	Perawatan pesawat Ultrasonografi adalah tindakan tindakan yang dilakukan untuk memelihara pesawat dengan baik dan benar sehingga selalu dalam keadaan siap pakai, bersih, terawat dan tahan lama
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah Perawatan pesawat Ultrasonografi
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 027/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi Rumah Sakit Permata Gunung Putri.
PROSEDUR	A. Petugas radiologi menyiapkan peralatan yaitu pesawat Ultrasonografi, panel kontrol, UPS, printer alat USG. B. Petugas radiologi melakukan perawatan pesawat Ultrasonografi Samsung HS40 sebagai berikut : a. Perawatan umum pesawat dilakukan oleh petugas radiologi atau radiografer antara lain : 1) Petugas radiologi membersihkan alat setiap hari agar terjaga kebersihannya. 2) Petugas radiologi dan dokter spesialis radiologi mengoperasikan alat USG sesuai dengan prosedur pengoperasian alat. 3) Petugas radiologi membersihkan dan merapihkan alat setelah digunakan. b. Perawatan khusus pesawat dilakukan oleh antara lain : 1) Pihak ke-3 melakukan kalibrasi alat USG minimal 1 x dalam satu tahun. 2) Petugas radiologi mematikan tombol freeze apabila alat sedang tidak digunakan agar transducer tidak melakukan

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PERAWATAN PESAWAT ULTRASONOGRAFI		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 041/SPO/RAD/RSPGP/IV/2025	No. Revisi 00	2 Dari 2

PROSEDUR	perekaman gambar untuk gelombang yang ada. 3) Petugas radiologi membersihkan probe, pesawat menggunakan lap yang halus dan tidak menggunakan cairan alkohol maupun desinfektan lainnya, cukup dengan lap kering saja. 4) Petugas radiologi membersihkan bekas gel pada probe setelah alat selesai digunakan agar gel tidak kering dan berkerak dan menjadi susah dibersihkan. 5) Petugas radiologi memasang penutup alat usg secara keseluruhan setelah alat selesai digunakan agar alat lebih terjaga dari debu dan kotoran. 6) Petugas radiologi menghubungi SPV radiologi dan teknik medik apabila di dalam pengoperasian pesawat dijumpai adanya kerusakan (error) untuk segera dilakukan tindak lanjut dan alat dapat berfungsi kembali dengan baik.
UNIT TERKAIT	1. Teknik medik 2. IPSRS

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Dwi Nurhayati, A.Md.Rad	SPV Radiologi		10 April 2025
Menyetujui 1	M1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Kepala Bagian Penunjang Medis		10 April 2025
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	Satuan Pengawas Internal		10 April 2025