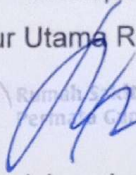
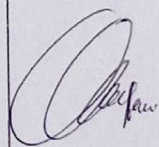
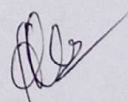


 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PENGUNAAN INFUS PUMP		
	No Dokumen : 10/SPO/INTENSIVE/RSPGP/II/2026	No. Revisi : 01	Halaman 1 Dari 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit:	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit	
	20 Februari 2026	 dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	Pengoprasian alat yang digunakan untuk mengatur tetesan infus agar lebih akurat.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam cara menggunakan <i>Infusion Pump</i> di Unit Intensive Rumah Sakit Permata Gunung Putri		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Permata Gunung Putri Nomor 081/SK-DIR/RSPGP/III/2025 tentang Pedoman Pelayanan Ruang Intensive.		
PROSEDUR	Persiapan Alat: 1. Mesin infusion pump siap pakai 2. Cairan infus atau obat 3. Selang infus sesuai dengan alat 4. Label obat/Stiker Infus 5. Tiang Infus 6. Kabel Charger Infus Pump Pelaksanaan: 1. Perawat menjaga privasi pasien dengan menutup gorden. 2. Perawat Unit Intensive mengucapkan salam, senyum, sapa dan memperkenalkan diri. 3. Perawat Unit Intensive mengidentifikasi pasien dengan menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir, kemudian mencocokkan dengan gelang identitas pasien. 4. Perawat Unit Intensive menempatkan alat didekat pasien. 5. Perawat Unit Intensive menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan kepada pasien atau keluarga.		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PENGUNAAN INFUS PUMP		
	No Dokumen : 10/SPO/INTENSIVE/RSPGP/III/2026	No. Revisi : 01	Halaman 2 Dari 3
	6. Perawat Unit Intensive menanyakan kesiapan pasien/keluarga sebelum kegiatan pemeriksaan dimulai. 7. Perawat melakukan cuci tangan sesuai standar sebelum tindakan. 8. Perawat membawa peralatan kedekat pasien dan sambungkan alat ke aliran listrik. 9. Perawat memeriksa kondisi infus pasien. Ganti selang infus sesuai dengan infus pump (sesuai ukuran selang yang tertera di setiap alat atau merk infus pump) pasang infus bila pasien belum terpasang infus/infus macet. 10. Perawat menutup kateter tip pada selang infus. 11. Perawat memasang selang infus ke alat infus pump. 12. Perawat memasang sensor pada chamber infus (harus dibatas air yang ada di chambernya). 13. Perawat mengecek kembali order dan kecepatan aliran. Hidupkan infus pump dan atur parameter sesuai dengan kebutuhan (volume dan kecepatan aliran). 14. Perawat menghidupkan power, atau volume dan kecepatan (sesuai petunjuk penggunaan alat) lalu tekan START. 15. Perawat memastikan tetesan Infus menetes dengan baik 16. Perawat Mendokumentasikan tindakan pemberian cairan melalui infus pump di catatan keperawatan SIMRS/ Flowsheet ICU. 17. Perawat menginformasikan kepada DPJP bahwa cairan/obat yang di instruksikan sudah running diberikan kepada pasien sesuai dengan advice DPJP.		
UNIT TERKAIT	Semua Unit Keperawatan dan kebidanan		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PENGUNAAN INFUS PUMP		
	No Dokumen : 10/SPO/INTENSIVE/RSPGP/II/2026	No. Revisi : 01	Halaman 3 Dari 3

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun	P	Ns. Anna Ristiarini, S.Kep	SPV Intensive Unit		28/2
Menyetujui	M	Ns. Amami, S.Kep., M.Kep	Manager Keperawatan		19/2
Verifikator	V	Ns. Irma Fatimah, S.Kep.	SPI		19/2