

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PROSEDUR DISENFECTAN MESIN		
	No Dokumen 007/SPO/DIALISIS/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1/2

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal terbit 5 Mei 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes
PENGERTIAN	Suatu tindakan untuk desinfeksi mesin sebelum dan setelah pelaksanaan hemodialisis	
TUJUAN	Sebagai langkah langkah untuk desinfeksi mesin setelah pelaksanaan hemodialisis	
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RS Permata Gunung Putri Nomor 134/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Dialisis	
PROSEDUR	1. Persiapan Alat : Citric Acid 30-40% sebanyak 50ml setiap kali desinfeksi mesin A. Cara kerja : 1) Pastikan kran Air RO sudah dihidupkan 2) Pastikan listrik dalam keadaan ON 3) Perawat memilih menu desinfectan 4) Perawat memeriksa cairan desinfectan 5) Perawat memilih menu disenfectan mesin a. Disenfectan pendek dengan citric acid 50% (chemical), 20 - 30 menit b. Disinfectan Panjang dengan citric acid 50% (chemical), 40 - 40 menit c. Disinfectan dengan suhu air 980C (thermal) 45 menit d. Untuk pengaturan mesin mati otomatis setelah selesai disinfectan e. Untuk pengaturan mesin menyala dan disinfeksi	

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Trust & Compassion</i>	PROSEDUR DISENFEKTAN MESIN		
	No Dokumen	No. Revisi :	Halaman
	007/SPO/DIALISIS/RSPGP/V/2025	00	2/2

	secara otomatis sesuai kebutuhan f. Perawat mencuci tangan 5 langkah sesuai dari WHO Keterangan : 1. Disinfeksi mesin pendek dengan citric acid digunakan pagi sebelum mesin digunakan dan siang antara jeda pasien 2. Disinfeksi mesin Panjang dengan citic acid digunakan pada mesin setelah selesai di gunakan sore hari
UNIT TERKAIT	1. Dokter Pelaksana Dialisis 2. Teknisi 3. Perawat Dialisis

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun	P1	dr. Ida Rosdiana Pattiasina	Dokter Pelaksana Unit Dialisis		3 Mei 2025
Menyetujui	M1	dr. Wediat Setiawan	Manager Pelayanan Medis		3 Mei 2025
Verifikator	V1	drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H	Komite Mutu		3 Mei 2025