

|  <b>Rumah Sakit<br/>Permata Gunung Putri</b><br><i>Trust &amp; Compassion</i> | PEMELIHARAAN SARANA <i>WATER TREATMENT</i>         |                           |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                | <b>No Dokumen</b><br>029/SPO/DIALISIS/RSPGP/V/2025 | <b>No. Revisi :</b><br>00 | <b>Halaman</b><br>1/2 |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STANDAR<br/>OPERASIONAL<br/>PROSEDUR ( SOP )</b> | Tanggal terbit<br><br>5 Mei 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ditetapkan<br>Direktur Utama Rumah Sakit<br><br>dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes |
| <b>PENGERTIAN</b>                                   | Pemeliharaan sarana <i>water treatment</i> adalah langkah-langkah yang dilakukan guna memelihara pengelolaan air <i>reverse osmosis</i> di Unit Dialisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| <b>TUJUAN</b>                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai acuan bagi petugas Unit Dialisis untuk melaksanakan pemeliharaan <i>water treatment</i>.</li> <li>2. Untuk menjaga kuantitas dan kualitas air RO sesuai dengan standar AAMI</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| <b>KEBIJAKAN</b>                                    | Surat Keputusan Direktur RS Permata Gunung Putri Nomor 134/SK-DIR/RSPGP/III/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Dialisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| <b>PROSEDUR</b>                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat mencuci tangan</li> <li>2. Perawat melakukan identifikasi pasien</li> <li>3. Tentukan area penyuntikan</li> <li>4. Pasang sarung tangan</li> <li>5. Melakukan teknik desinfektan dengan menggunakan alkohol swab memutar dari dalam ke luar</li> <li>6. Cek kembali nama pasien, nama obat, dosis dan cara pemberian</li> <li>7. Buang udara yang ada pada syringe</li> <li>8. Penting untuk diketahui bahwa pemberian subkutan lebih disarankan untuk kerja EPO lebih baik</li> <li>9. Lakukan penusukan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setelah disuntikan aspirasi terlebih dulu, jika tidak ada darah obat boleh dimasukkan secara perlahan sampai dosis obat masuk seluruhnya ke tubuh</li> </ol> </li> </ol> |                                                                                                                                                                |

|  <b>Rumah Sakit<br/>Permata Gunung Putri</b><br><i>Rest to Compassion</i> | PEMELIHARAAN SARANA WATER TREATMENT                |                           |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                            | <b>No Dokumen</b><br>029/SPO/DIALISIS/RSPGP/V/2025 | <b>No. Revisi :</b><br>00 | <b>Halaman</b><br>2/2 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | pasien.<br>b. Setelah obat masuk seluruhnya cabut syringe kemudian tekan kembali area bekas tusukan.<br>c. Berikan tensoplast<br>10. Rapihkan kembali alat – alat yang sudah digunakan<br>11. Pawat melakukan cuci tangan<br>12. Perawat melakukan Dokumentasikan kegiatan di lembar observasi (Catatan Perawatan) |
|  | 1. Dokter Penanggung Jawab Unit Dialisis<br>2. Dokter Pelaksana Dialisis                                                                                                                                                                                                                                           |

### LEMBAR VERIFIKASI

| PIC         |    | NAMA                              | JABATAN                        | TANDA TANGAN                                                                          | TANGGAL    |
|-------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Penyusun    | P1 | dr. Ida Rosdiana Pattiasina       | Dokter Pelaksana Unit Dialisis |  | 3 Mei 2025 |
| Menyetujui  | M1 | dr. Wediat Setiawan               | Manager Pelayanan Medis        |  | 3 Mei 2025 |
| Verifikator | V1 | drg. Praditiyas Dwioktaviani, M.H | Komite Mutu                    |  | 5 Mei 2025 |